



COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (kolloidalt guld)



Operationell video


**Endast för in vitro -diagnostik.
Läs instruktionen noggrant före användning.**

[Avsedd användning]


Denna produkt används för in vitro-kvalitativ detektion av SARS-CoV-2-antigenet i humant näspinnprov. Den är avsedd för personligt bruk av otränade lekmän som en snabb testmetod för ny coronavirusinfektion. Men ta inte ett medicinskt beslut utan att rådfråga läkaren.

Den är lämplig för användare över 15 år. Användare under 15 år bör testas med hjälp av vuxna. Både symtomatiska och asymtomatiska infektioner kan testas.

[Material och komponenter]


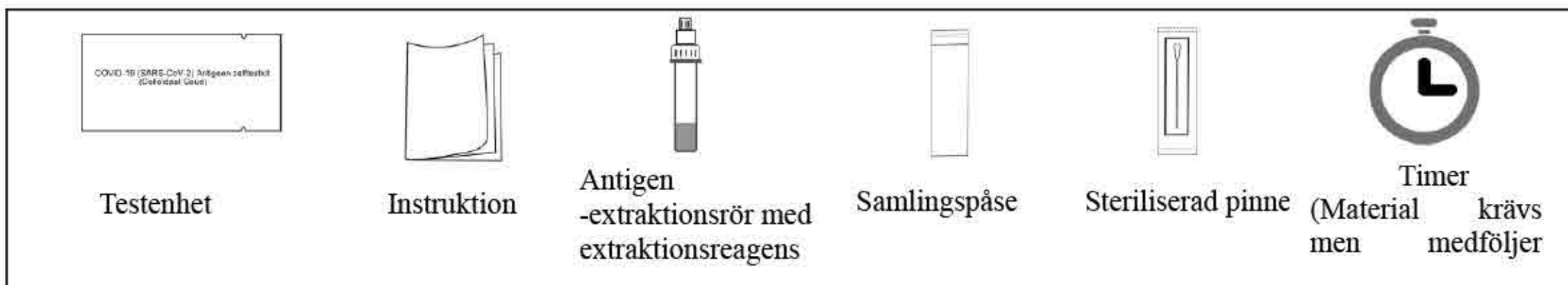


[Förberedelse inför testet]

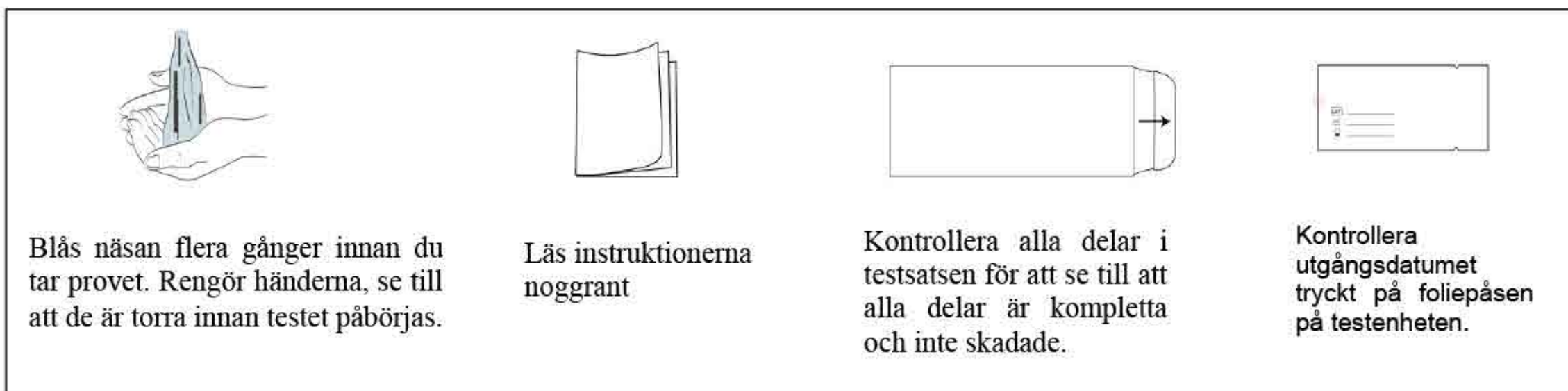

[Test procedur]

Låt testanordningens extraktionsreagens och prover ekvibrera till rumstemperatur (15 ~ 30 °C) före testning. Håll temperaturen på 15 ~ 30 °C och luftfuktigheten på 20% -80% under hela testet.

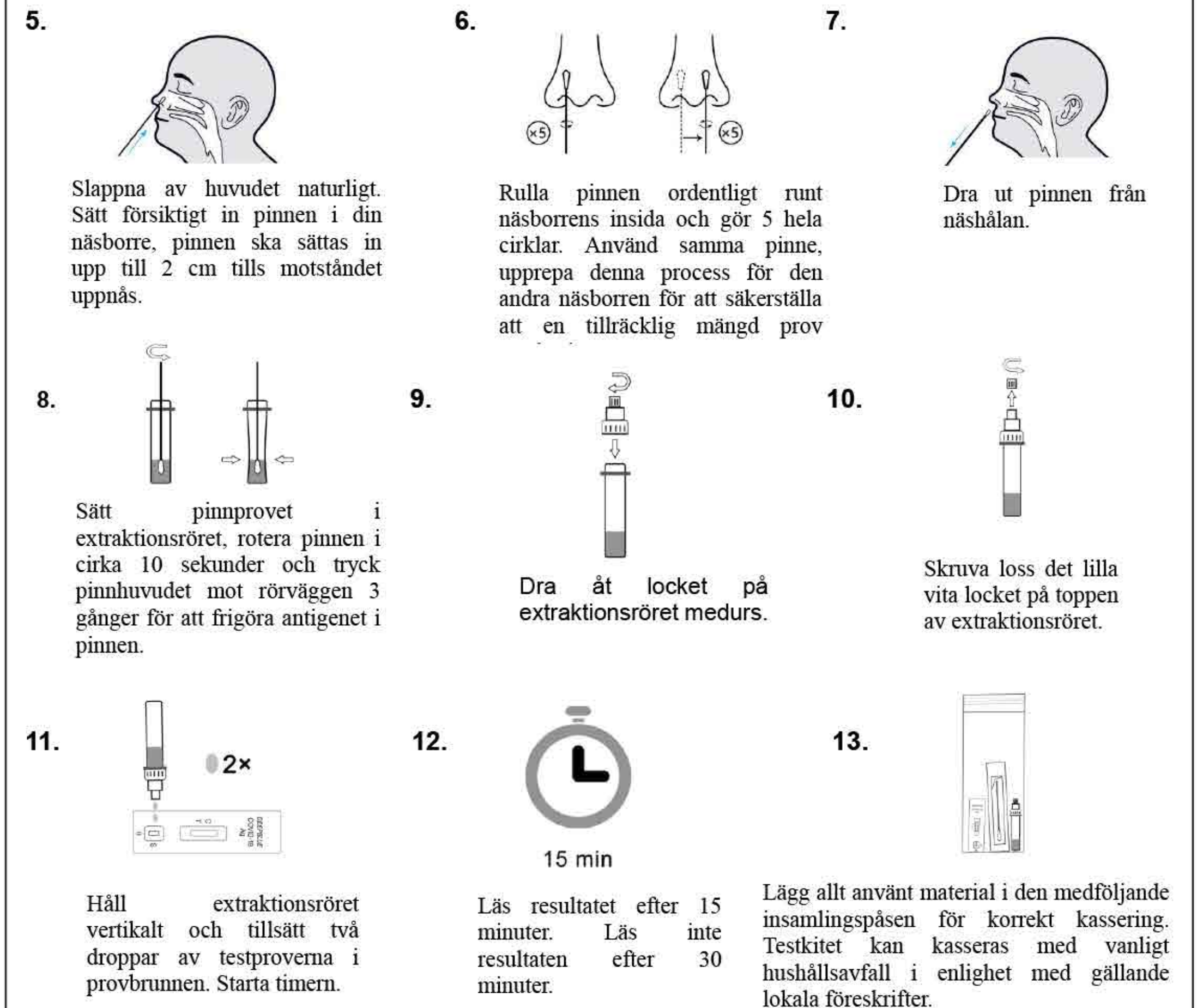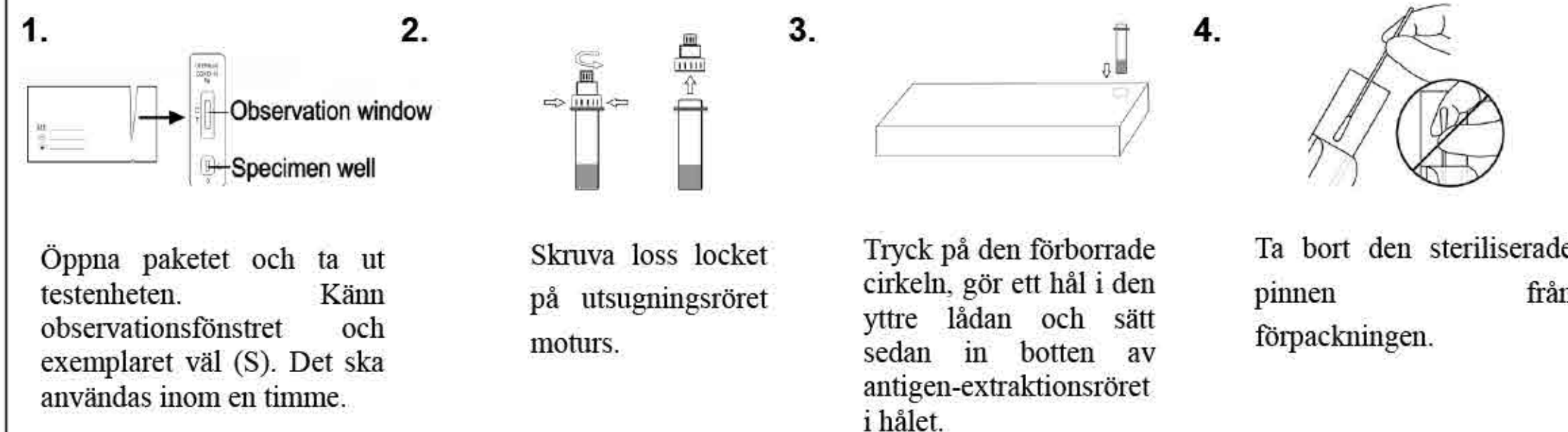

[Tolkning av testresultat]

Negativt resultat:




Negative

Om det bara finns en kontrollinje (C) och testlinjen (T) är färglös, indikerar det att SARS-CoV-2-antigen inte har detekterats och resultatet är negativt.

Om testresultatet är negativt: Fortsätt att följa alla tillämpliga regler för kontakter och skyddsåtgärder. Även om testet är negativt kan det finnas en infektion. Vid tvivel, upprepa testet efter 1-2 dagar eftersom coronaviruset inte kan detekteras exakt i alla infektionsstadier.

Positivt resultat:

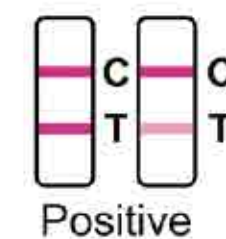


Positive

Om både kontrollinjen (C) och testlinjen (T) visas indikerar det att SARS-CoV-2-antigen har detekterats och resultatet är positivt.

Om testresultatet är positivt:

- För närvarande finns det en misstänkt infektion av COVID-19.
- Kontakta din läkare eller den lokala hälsoavdelningen omedelbart.
- Följ de lokala riktlinjerna för självisolering.
- Utför PCR -test för bekräftelse.

Ogiltigt resultat:

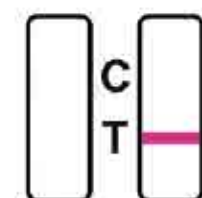

Invalid

Om kontrollinjen (C) inte observeras, anses testet vara ogiltigt om testlinjen (T) är synlig eller inte. Ett nytt test måste utföras med en ny testanordning.

Om testresultatet är ogiltigt kan det orsakas av felaktig testoperation. Upprepa testet. Om testresultatet fortfarande är ogiltigt, kontakta din läkare eller COVID-19 testcenter.